



Lumbalpunktion zur Bestimmung der Neurotransmitter

Vorschrift für die Probennahme, -aufbewahrung u. -versand

1. Material:

5 sterile Röhrchen, nummeriert (1 bis 5) und Patientennamen. Falls Sie keine von uns vorgefertigten Röhrchen haben, unwickeln Sie das 4. Röhrchen mit Aluminiumfolie (wir schicken auch gerne die Röhrchen zu: Tel: 06221-568276; Fax: 06221-565565).

2. Lumbalpunktion:

- Bitte je Röhrchen 10-12 Tropfen Liquor abfüllen und auf Trockeneis stellen falls kein Trockeneis im Moment verfügbar ist, sollten die Proben so schnell wie möglich eingefroren werden (-80°C oder ggf. -20°C) und bis zum Versand auf Trockeneis auch nicht aufgetaut werden. Röhrchen Nr. 1 können Sie für andere Untersuchungen nehmen.
- Röhrchen Nr.2 bis 5 bitte zu uns schicken (ausreichend für die gesamte Basisuntersuchung der Neurotransmitter).
- Die Liquor Proben können bei -80°C maximal ein Jahr lang gelagert werden.

Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin

Angelika-Lautenschläger-Klinik

Klinik Kinderheilkunde I

(Schwerpunkt: Allg. Pädiatrie, Neuropädiatrie, Stoffwechsel, Gastroenterologie, Nephrologie)

Prof. Dr. med. G.F. Hoffmann

Ärztlicher Direktor

Sektion für Neuropädiatrie und Stoffwechselmedizin

Leiter: Prof. Dr. med. S. Kölker

Dietmar-Hopp-Stoffwechsellabor

Laborleitung: PD Dr. phil. nat. J.G. Okun

Ärztliche Leitung: PD Dr. med. D. Haas

Im Neuenheimer Feld 669
D-69120 Heidelberg

☎ +49 06221/ 56-8276 Probenannahme

☎ +49 06221/56-5565

21.04.2020

Kinderklinik_stoffwechsellabor@med.uni-heidelberg.de
www.klinikum.uni-heidelberg.de
www.stoffwechsel.uni-hd.de



3. Probenversand:

Versand des Liquors auf **Trockeneis**

Tragen Sie bitte dafür Sorge, dass die Probe das Labor an einem **Wochentag** bis spätestens Freitag 14.00 Uhr erreicht.

4. Versandadresse:

Stoffwechszentrum Heidelberg

Stoffwechzellabor

Im Neuenheimer Feld 669

69120 Heidelberg